

دستگاه هندپیس HANDPIECE



Model:

Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 09
Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 14
Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 17
Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 23
Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 36
Tosap Ultrasonic Surgical Scalpel 45

از اینکه یکی از محصولات شرکت ما را خریداری و به ما اعتماد کرده اید، سپاسگزاریم. شرکت طلوع صدرنشینان پارس به عنوان تولید کننده ی محصولات با کیفیت با استفاده از دانش روز و تمرکز بر تیم تحقیق و توسعه مجرب جهت پیشرفت در این صنعت شناخته شده است. این کاتالوگ می تواند شما را با این محصول آشنا ساخته و نحوه ی راه اندازی آن را شرح می دهد. لطفا قبل از اولین استفاده از دستگاه، این کاتالوگ را به دقت مطالعه نمایید تا از نحوه استفاده ی ایمن از دستگاه (جهت بیمار و کاربر) مطلع گردید. لطفا این کاتالوگ همیشه در کنار دستگاه باشد.



کاربرد محصول

این دستگاه جهت اتصال به تجهیز
انسداد عروق ساخته شده است که
هدف آن انتقال انرژی اولتراسونیک به
مناطق تحت جراحی به جهت برش و
انعقاد بافت می باشد.

ویژگی ها	عملکرد بالینی
برش و انعقاد با کوچکترین آسیب حرارتی	تشریح بافت های مجاور اندام های مهم برش و انعقاد همزمان
بدون اسکار و دود کم	جلوگیری از خونریزی بعد از عمل
عدم عبور جریان از بدن بیمار	بدون آسیب به بافت رسانی

تمامی حقوق این دستگاه برای شرکت طلوع صدرنشینان پارس محفوظ می باشد.

عملیات سیستم

هنگامی که فک بسته است و چیزی داخل آن نیست، آن را فعال نکنید. هنگام فعال کردن، تیغه را به وسایل سخت مانند فلز وصل نکنید تا به تیغه آسیب نرسد.




ماکزیمم میزان استفاده از هندپیس انسداد عروق ۹۰ شات یا ۱۵۰ دقیقه میباشد و بعد از آن قابل استفاده نمی باشد و می بایست تعویض گردد. همچنین هندپیس انسداد عروق یکبار مصرف بوده و فقط در هر یک عمل جراحی قابلیت استفاده دارد.

اجزای محصول

پنل جلو


- ۱- فک
- ۲- تیغه
- ۳- اینزرت
- ۴- هندل

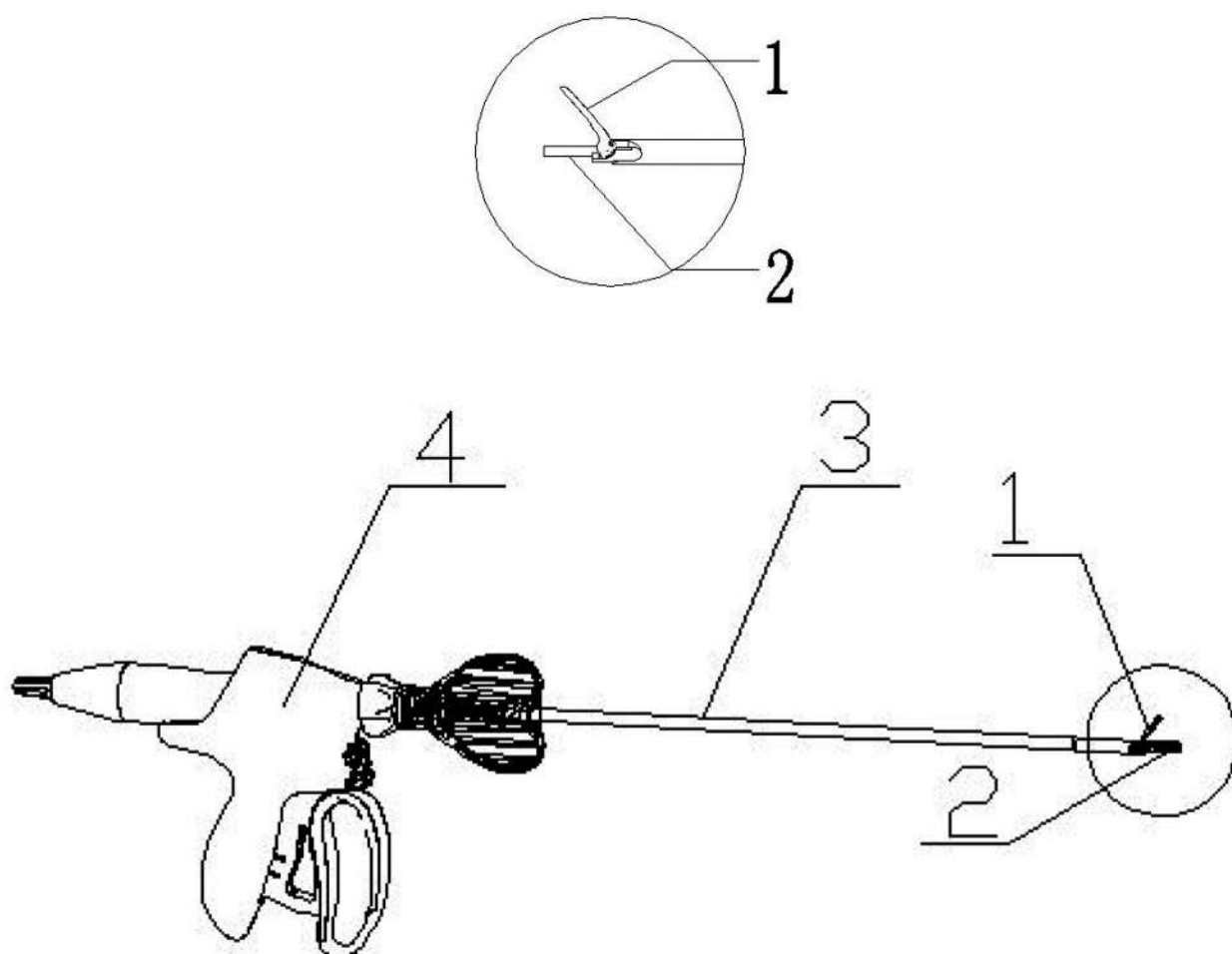


عملکرد دستگاه هندپیس

در قسمت جلویی هندل از دو کلید مثبت و منفی برای تعیین سطح توان دستگاه به جای پدال پایی ژنراتور میتوان استفاده نمود.

هشدار: گرم شدن غیر عادی مبدل در حین استفاده نشان دهنده اتصال نامناسب است و بر این اساس باید بررسی دقیق انجام شود.

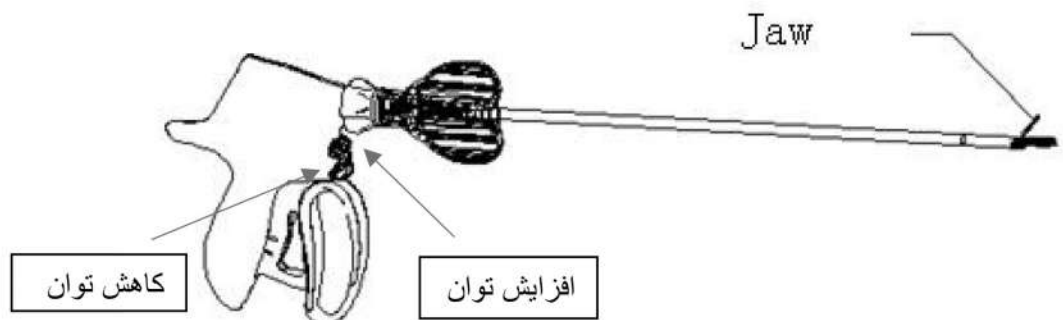

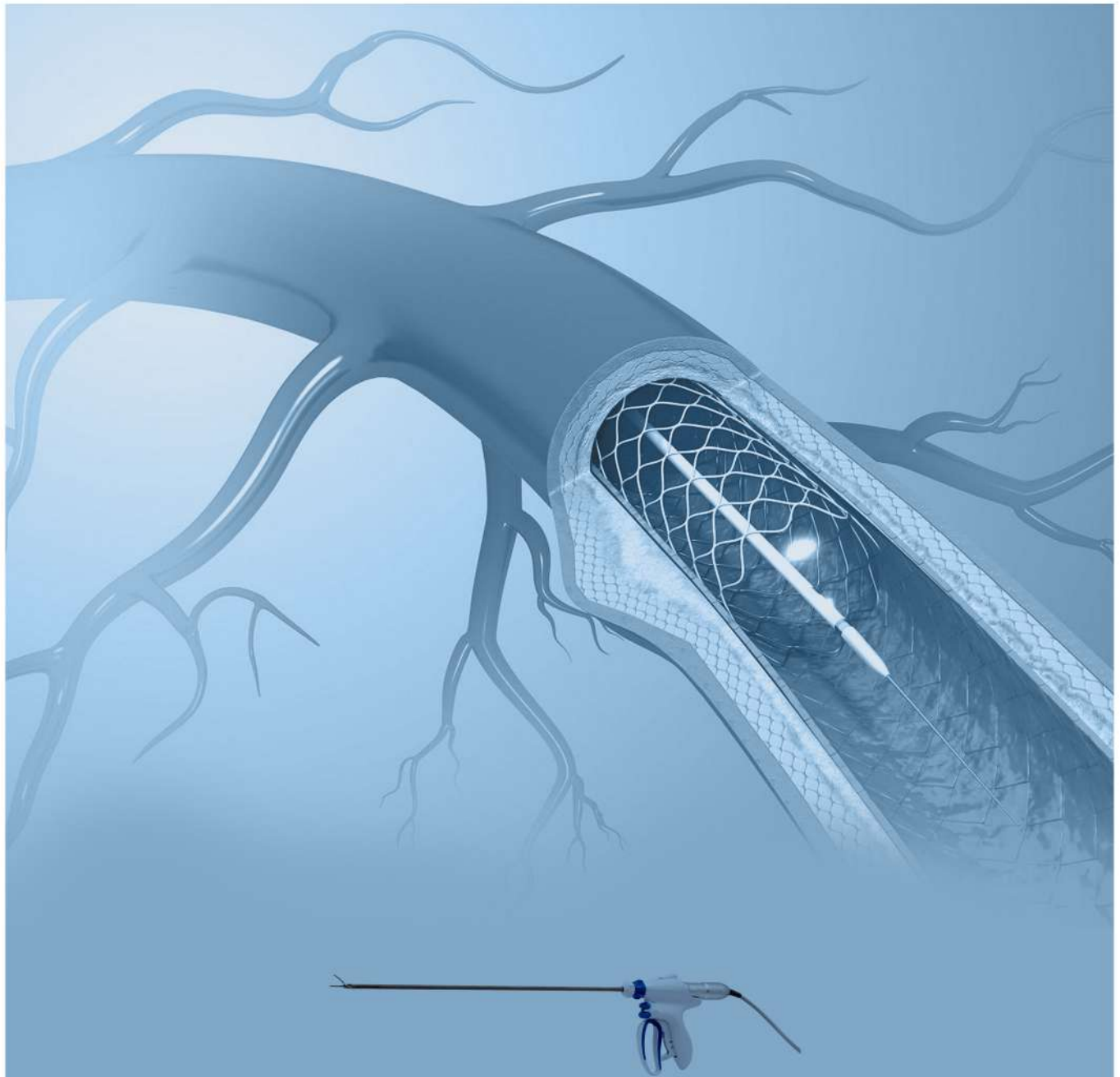

کارخانه: قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز ۲ خیابان صیاد شیرازی ۱۶ پلاک ۴۷۴
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهرآرا، نبش خیابان ۱۶ متری محمدی، پلاک ۱، واحد ۳

وب سایت: www.tsnmed.com

تلفن: ۰۲۱۶۶۵۵۴۷۰۰